

Struttura: SOC Laboratorio Analisi	Tipo di documento: ALLEGATO	Codice: ALL 13 di PP 37-LAB 01	
Titolo documento: Tampone oculare, raccolta, conservazione, trasporto di campioni per indagini microbiologiche	Pagina 1 di 1	Revisione: 00	Data: 08/03/2021
Redatta da: Dirigente Biologo SOC Laboratorio Analisi	Approvata da: Direttore SOC Laboratorio Analisi	Validata da: Responsabile Governo Clinico Qualità Appropriatezza Rischio Clinico	

## TAMPONE OCULARE- CONGIUNTIVALE

Tampone faringeo/vari	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Colt. tampone faringeo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Colt. Streptococcus pyogenes
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Colt. tampone nasale
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Colt. tampone auricolare
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Colt. oculare/congiuntivale

### Norme per il paziente

Evitare di assumere antibiotici per 5-7 giorni prima di effettuare l'esame.  
Non è necessario presentarsi a digiuno.

### Materiale occorrente

1. Tampone con asta fine di alluminio e terreno di trasporto.
2. Se richiesta anche la ricerca di Chlamydia trachomatis (mediante amplificazione genica o PCR), ritirare in Laboratorio il kit apposito, vedere metodica relativa IO-LAB21.
3. DPI: guanti in vinile /nitrile non sterili, mascherina chirurgica, visiera.

### Raccolta del campione

1. Contrassegnare i due tamponi con il nome del paziente e la dizione "congiuntivale DX" e "congiuntivale SX".
2. Eseguire l'igiene delle mani e indossare i DPI.
3. Tenere aperte le palpebre del paziente aiutandosi con una garza sterile.
4. Appoggiare il primo tampone sulla congiuntiva dell'occhio destro, ruotarlo delicatamente e riporlo nel tubo- contenitore.
5. Appoggiare il secondo tampone sulla congiuntiva dell'occhio sinistro, ruotarlo delicatamente e riporlo nel tubo- contenitore.

### Conservazione del campione

I tamponi con terreno di coltura si conservano 48 ore a temperatura ambiente.